

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель: Индивидуальный предприниматель Приходкин Игорь Геннадьевич (ИП Приходкин И.Г.), Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 188-25

Официальный дистрибьютор: ООО «Армедика», Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 20. Телефон: 8 (800) 100-13-05

Электронная почта: info@yukigroup.ru

Сервисный центр: Россия, 620902, г. Екатеринбург, ул. 10-я Самородная, д.6
Телефон: +7 (343) 226 48 64

Электронная почта: 401@yukigroup.ru

Срок службы - не менее 2 лет.

Гарантийный срок на матрас воздушный противопролежневый с компрессором по ТУ 32.50.50-001-0162467818-2018 - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю или со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 18 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя - 6 мес.

Техническое обслуживание и ремонт матраса производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.


СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Матрас воздушный противопролежневый с компрессором соответствует ТУ 32.50.50-001-0162467818-2018 и признан годным для эксплуатации. Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8455 от 10.06.2019

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара			
Серийный номер (если предусмотрен)		Гарантийный период (см. в паспорте)	
Дата покупки		Номер чека / заказа	
Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями предоставления гарантии, правилами соблюдения мер безопасности, инструкциями по эксплуатации, уходу и обслуживанию ознакомлен.			
Дата		ФИО и подпись	

Продавец:

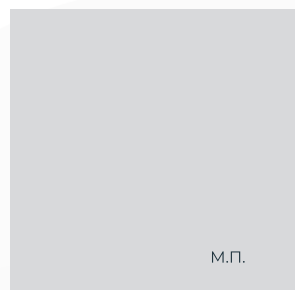

М.П.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизировать матрас воздушный противопролежневый с компрессором по ТУ 32.50.50-001-0162467818-2018, вышедший из эксплуатации, следует по СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Матрас воздушный противопролежневый с компрессором по ТУ 32.50.50-001-0162467818-2018 относится к Классу А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам, и может утилизироваться по истечению срока эксплуатации совместно с бытовыми отходами.

Расшифровка символов, используемых при маркировании изделия

IP20



Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой



Класс II защиты от поражения электрическим током



Рабочая часть типа В
Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки)



Верх (указывает правильное вертикальное положение)



Бережь от влаги

ЮКИ

ООО «АРМЕДИКА», 620075,
г. Екатеринбург,
ул. Шевченко 20, пом. 7
тел. 8-800-100-13-05

www.yukigroup.ru



ЮКИ

МАТРАС ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ

трубчатый с компрессором

ЮКИ ПМ-3



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Матрас (матрац) воздушный противопролежневый с компрессором по ТУ 32.50.50-001-0162467818-2018

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Матрас (матрац) воздушный противопролежневый с компрессором по ТУ 32.50.50-001-0162467818-2018 представляет собой противопролежневую систему, состоящую из матраса с секциями и компрессора. Матрас предназначен для профилактики образования пролежней путем циклического перераспределения опорных поверхностей, контактирующих с телом пациента, в лечебно профилактических учреждениях различного профиля, а также в домашних условиях. Подходит для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пациента или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями настоящего руководства и общими требованиями безопасности.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предельная рабочая нагрузка	не менее 120 кг
Рабочий режим, мин.	не более 15 мин.
Рабочий цикл (нагнетание воздуха/пауза), мин.	4,5/1,5
Режим работы	круглосуточно
Функция статического положения	нет
Лазерная перфорация	опционально
Матрас:	Компрессор:
Размер (д*ш*в), ±10%, мм	2000*900*109
Материал	Медицинский нейлон ПВХ
Форма секции	Трубчатая
Количество секций	18
	Напряжение, В
	Частота, Гц
	Потребляемая мощность, Вт
	Рабочее давление, мм рт.ст.
	Уровень шума, дБ, не более
	220
	50
	13,5
	90-127
	50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Матрас	1 шт.
Компрессор	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

- 1. кнопка включения
- 2. регулятор давления
- 3. воздушный фильтр
- 4. крючки для подвешивания

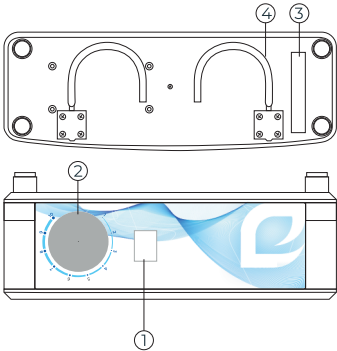

Прежде, чем использовать матрас воздушный противопролежневый с компрессором, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством.

Примечание: применение данного противопролежневого матраса должно полностью соответствовать этой инструкции, иначе продукт может быть поврежден. Пожалуйста, проводите дезинфекцию, соблюдая требования настоящего руководства.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Установите компрессор на плоскую, жесткую поверхность или подвесьте на поручни ножного отдела кровати, используя крючки на корпусе компрессора.
- Противопролежневый матрас расстелите на кровати. Вход для соединительных трубок должен быть расположен в ножном отделе кровати.
- Подсоедините компрессор к матрасу с помощью соединительных трубок.
- Убедитесь, что трубки не заломлены и не проходят под матрасом.
- Включите компрессор (положение «ВКЛ»). Воздух начнет поступать в матрас.
- Застелите матрас простыней (не входит в комплект поставки). Матрас готов к эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Уложите пациента.
- Отрегулируйте давление, выбрав соответственно «MIN» или «MAX» в зависимости от веса пациента и комфорта. Оптимальный вариант - когда между телом пациента и ненадутой частью матраса проходят два пальца руки.

ВНИМАНИЕ: РЕЖИМ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

- Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха: от +10 °С до +35 °С
 - относительная влажность: не более 80% при 25 °С

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Техническое обслуживание изделия включает своевременное соблюдение правил очистки и дезинфекции, в т.ч. очистку фильтра компрессора от загрязнений, в связи с этим не пренебрегайте требованиями раздела «УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ». При возникновении поломки изделие подлежит ремонту. Вероятные типы поломок, причины их возникновения и методы устранения перечислены в разделе «ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ». В случае возникновения поломки, не отраженной в инструкции, необходимо обратиться в сервисный центр производителя. Адрес и телефон сервисного центра указаны в разделе «ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ».

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Тип поломки	Проблема	Метод устранения
Матрас не накачивается	Индикатор включен	Отсоединена трубка
	Индикатор выключен	Матрас проколот
Матрас надувается не полностью	Не подключено питание	Присоединить трубку
	Давление минимально	Заклейте дыру
	Матрас трещит	Подключить питание
	Воздушный фильтр заблокирован из-за долгого использования	Повернуть диск направо
		Развернуть матрас и вымыть
		Продуть фильтр

Устранение неисправностей, не вошедших в настоящий перечень (в т.ч. замена шнура питания), производится специалистами сервисного центра производителя.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Проверяйте воздушный фильтр компрессора один раз в месяц. В случае загрязнения помойте фильтр раствором моющего средства, высушите и установите на место. Во избежание проколов избегайте контактов матраса с колюще-режущими предметами. Гигиеническую обработку производить не реже одного раза в месяц. Сушить в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Наружная поверхность матраса устойчива к воздействию 1%-го раствора моноклорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование матрасов проводится любым видом наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Хранить матрас следует в хорошо вентилируемом помещении, условия хранения должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150. Транспортировка матрасов без заводской упаковки нежелательна.

УПАКОВКА

Для транспортировки матрас уложен в чехол из полиэтиленовой пленки. Компрессор уложен в пакет из воздушно-пузырчатой пленки и вместе с матрасом вложен в картонный ящик. Эксплуатационные и товаросопроводительные документы вкладываются в пакет из полиэтиленовой пленки.