



**Очиститель для кожи Clinar (Клинар),
баллон (спрей) 50 мл**

ИНСТРУКЦИЯ

Назначение

Медицинское изделие предназначено для быстрого и безболезненного удаления с кожи любых адгезивных изделий (пластыри, датчики, стомные мешки различных типов), для создания защитного барьера на коже.

Предохраняет кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия содержимого кишечника и мочевого пузыря. Обеспечивает защиту от опрелостей, натирания и раздражения от использования адгезивных изделий, а также повышает надежность приклеивания изделий

Описание

Летучая бесцветная жидкость со слабовыраженным запахом. Формула состава позволяет растворить клей на различных адгезивных поверхностях, не повреждая кожу и не вызывая раздражения. Эффективен для удаления остатков клея с кожи. Не содержит спирта, ароматизаторов и масел.

Показания к применению:

Очиститель для кожи Clinar предназначен для быстрого и безболезненного удаления с кожи

любых адгезивных изделий (пластыри, датчики, стомные мешки различных типов).

- снятие послеоперационных пластырей;
- снятие пластырей с катетеров, в том числе с ЦВК/порта;
- снятие стомных мешков при колостомах, уростомах, илеостомах;
- удаление остатков клея с кожи;
- снятие датчиков для измерения уровня глюкозы.

Область применения:

Медицинское изделие может применяться как в условиях стационара квалифицированным медицинским персоналом, так и в амбулаторных условиях самим пациентом или лицами, осуществляющими уход за ним

Состав

*Гексаметилдисилоксан,
циклопентасилоксан.*

Способ применения

Распылите очиститель для кожи на поверхность адгезива. Подождите несколько секунд и удалите адгезив с кожи. При необходимости удалите остатки клея с кожи марлевой салфеткой, пропитанной очистителем для кожи Clinar.

При удалении пластырей, датчиков и стомных мешков, имеющих клеенчатый верхний слой, не пропускающий влагу, наносите очиститель для кожи непосредственно на границу кожи и адгезива.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость к отдельным компонентам.

Форма выпуска:

Средство выпускается формате спрея (50 мл).

Условия хранения

Хранить в заводской упаковке в местах, недоступных для детей, вдали от электроприборов и источников тепла при температуре от +5°C до +40°C.

ВНИМАНИЕ! Используйте, следуя инструкции. Не допускать попадания в глаза. Только на наружного применения. При возникновении раздражения прекратите использование средства. Если сомневаетесь, протестируйте средство на небольшом участке кожи. ОГНЕОПАСНО! Не допускать нагрева флакона.

Утилизация: Медицинское изделие следует утилизировать как отходы класса А – согласно СанПиН 2.1.3684-21.
Срок годности: 4 года.

Производитель: ООО «СТВ»
119530, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 28, стр. 2, ком. 33.

stvmed.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ