

Регистрационное
удостоверение
ФСЗ 2011/09576

 ЮКИ

КРЕСЛО-КОЛЯСКА ИНВАЛИДНАЯ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

FS 957LQ ЮКИ

АЛЮМИНИЕВАЯ
РАМА
ТРЕХРУБНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Кресло-коляска FS 957LQ ЮКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Кресло-коляска предназначено для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, а также для приведения в движение и управления сопровождающим лицом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Размер №1	Размер №2	Размер №3	Размер №4	Размер №5
Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм	1150x635x950	1150x635x950	1150x635x950	1150x635x950	1150x635x950
Ширина сиденья, мм	405	430	455	480	505
Высота сиденья, мм	от 450 до 550				
Диаметр колес (передние/задние), мм	200/600	200/600	200/600	200/600	200/600
Задние колеса быстросъемные	Литые или пневматические				
Передние колеса	Литые	Литые	Литые	Литые	Литые
Максимальная допускаемая нагрузка, кг	130	130	130	130	130
Масса (без дополнительного оборудования), кг	16,8	17,4	17,4	18	18

Примечание:

* Допустимое отклонение массогабаритных характеристик $\pm 5\%$.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Каркас – 1 шт.
- Подушка на сиденье – 1 шт.
- Колесо заднее быстросъемное – 2 шт.
- Подножка – 2 шт.
- Антипрокидыватель – 2 шт.
- Болт-барашек – 2 шт.
- Перекладина для фиксации – 1 шт.
- Ключ шестигранник – 2 шт.
- Ключ универсальный – 1 шт.
- Насос (опционально) – 1 шт.
- Съёмная спинка - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

СХЕМА ТОВАРА С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ



Перед эксплуатацией подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ОСТОРОЖНО:

- 1. Не используйте кресло-коляску на очень крутых склонах.**
- 2. Не используйте кресло-коляску на дорогах с неровным покрытием (большим количеством ям).**
- 3. Тормоза можно использовать для парковки.**
- 4. Не используйте ручной тормоз кресла-коляски, когда она находится в движении.**

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Складывается и раскладывается кресло-коляска без применения инструмента.

1. Придав вертикальное положение, разложить каркас кресла-коляски по ширине, надавив на направляющие сиденья.
2. Для установки задних колес совместить ось колеса с отверстием на каркасе кресла-коляски, нажать на кнопку на оси до упора, удерживая ее вставить ось с колесом в отверстие на каркасе до щелчка, затем отпустить кнопку.
3. При установке подножек необходимо надеть их на направляющие, находящиеся на каркасе кресла-коляски, и повернуть их, плотно надавливая, в сторону (для правой подножки повернуть против часовой стрелки, для левой - по часовой стрелке) до щелчка фиксатора.
4. Положить подушку на сиденье.
5. В задние отверстия рамы кресла-коляски, расположенные снизу, под сиденьем, необходимо вставить антипрокидыватели, до щелчка фиксатора.
6. В отверстия на задней части сиденья вставить спинку и зафиксировать болтами-барашками
7. С тыльной стороны кресла-коляски на ручках зафиксировать перекладину для придания жесткости.
8. Кресло-коляска готово к эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для посадки спереди:

- поставьте кресло-коляску на стояночный тормоз;
- сложите вверх подножки;
- при помощи сопровождающего лица переместите пользователя в кресло-коляску;
- опустите вниз подножки и поставьте на них ноги;
- пристегните ремень безопасности.

Высадка осуществляется в обратной последовательности.

Для посадки с боковой стороны:

- поставьте кресло-коляску на стояночный тормоз;
- снимите подлокотник со стороны, с которой будет пересаживаться пользователь;
- сложите подножки вверх;
- при помощи сопровождающего лица переместите пользователя в кресло-коляску;
- установите подлокотники и подножки в исходное положение;
- пристегните ремень безопасности.

Высадка осуществляется в обратной последовательности.

Сопровождающее лицо может приводить кресло-коляску в движение и управлять им с помощью предусмотренных для этого рукояток.

При самостоятельном передвижении на кресле-коляске используйте ободы на задних колесах.

Для парковки используйте стояночный тормоз.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура: от +10°C до +35°C;
- относительная влажность: не более 90% (без образования конденсата);
- атмосферное давление: 860 гПа - 1060 гПа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Обслуживание и ремонт товара производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет покупателя.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Допускается протирание поверхностей кресел-колясок 1 % раствором монохлорамина ХБ.
- Изделие не требует проведения предстерилизационной очистки и стерилизации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски.

- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы.
- Необходимо иметь в виду, что изменение положения центра тяжести за счет смещения тела пациента или изменения нагрузки на коляску, а также наклоне на угол более 10° повышается опасность опрокидывания коляски.
- При движении без торможения в направлении препятствия (бордюр, ступенька и т.д.) имеется опасность выпадения из коляски вперед.
- При посадке в коляску и высадке из нее колеса необходимо зафиксировать с помощью тормозов.
- При посадке в коляску и высадке из нее не наступайте на подножку.
- Не превышайте предельную грузоподъемность коляски.
- Прежде чем в одиночку выполнить какое-либо незнакомое действие при использовании коляски, проделайте это под чьим-либо присмотром.
- Не тянитесь за чем-либо через спинку коляски - есть риск опрокинуть коляску.

Сопровождающее лицо должно:

- проверить ходовые качества коляски;
- проверить, чтобы стопы пользователя устойчиво располагались на подножках, а края одежды и покрывала не попадали в спицы колёс;

- предупреждать пользователя о планируемых действиях, особенно при наклоне коляски;
- не разгонять коляску слишком быстро, не изменять резко направление движения;
- не оставлять пользователя в коляске без присмотра, даже если коляска стоит на тормозе;
- следить, чтобы колени и локти пользователя не задевали дверных проёмов и косяков;
- ни при каких обстоятельствах не отпускать коляску при движении в гору или с неё;
- ни в коем случае не наклонять коляску вперёд;
- чтобы съехать с бордюра, необходимо развернуть коляску задними колёсами вперёд, спустить её сначала на задних колёсах, затем опустить передние при отсутствии пандуса;
- при преодолении бордюра наклонить коляску к себе, поставить на бордюр передние колёса, затем подтянуть задние при отсутствии пандуса;
- проводить регулярные осмотры коляски;
- при движении по дорогам соблюдать правила дорожного движения.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизировать, вышедший из эксплуатации товар, следует по СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Фосан Донгфэнг Медикал Эквипмент Мануфактори, (Лтд.)

Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, LTD, 5 Xingfu Rd., zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan city, P.R., China

Адрес: Китай, Дальнее зарубежье, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, LTD, 5 Xingfu Rd., Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan city, China

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «Армедика»,

620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Шевченко, 20, помещ. 7
Телефон: 8 (800) 100-13-05
Электронная почта: info@yukigroup.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

620902, г. Екатеринбург,
ул. 10-ая Самородная, д. 6
+7 (343)226-48-64, 401@yukigroup.ru

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы - не менее 60 месяцев.

Критерием предельного состояния изделия является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления его работоспособности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев.

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
ПРИМЕЧАНИЕ:

Предприятие - изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции изделия, поэтому возможны некоторые изменения, неотраженные в настоящем Паспорте и инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	<input type="text"/>		
Серийный номер (если предусмотрен)	<input type="text"/>	Гарантийный период (см. в паспорте)	<input type="text"/>
Дата покупки	<input type="text"/>	Номер чека / заказа	<input type="text"/>
Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями предоставления гарантии, правилами соблюдения мер безопасности, инструкциями по эксплуатации, уходу и обслуживанию ознакомлен.			
Дата	<input type="text"/>	ФИО и подпись	<input type="text"/>

Продавец:



ООО «АРМЕДИКА», 620075,
г. Екатеринбург,
ул. Шевченко 20, пом. 7
тел. 8-800-100-13-05

www.yukigroup.ru

