

Регистрационное
удостоверение
ФСЗ 2011/09576

 **ЮКИ**

КРЕСЛО-КОЛЯСКА ИНВАЛИДНАЯ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

FS951B-56 ЮКИ

РАМА
ЧЕТЫРЕХРУБНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Кресло-коляска FS951B-56 ЮКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Кресло-коляска предназначено для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, а также для приведения в движение и управления сопровождающим лицом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм	1350х780х850/910
Ширина сиденья, мм	560 (22")
Высота сиденья, мм	470/490/510
Диаметр колес (передние/задние), мм	185/600
Задние колеса быстросъемные	Литые или пневматические
Максимальная допускаемая нагрузка, кг	150
Масса брутто, кг	28

Примечание:

* Допустимое отклонение массогабаритных характеристик $\pm 5\%$.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Каркас (стальная рама) – 1 шт.
- Подушка на сиденье (опционально) – 1 шт.
- Колесо заднее быстросъемное – 2 шт.
- Подножка с мягкими упорами – 2 шт.
- Антипрокидыватель – 2 шт.
- Ключ шестигранник – 1 шт.
- Ключ универсальный – 1 шт.
- Насос (опционально) – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

СХЕМА ТОВАРА С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ



Перед эксплуатацией подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ОСТОРОЖНО:

- 1. Не используйте кресло-коляску на очень крутых склонах.**
- 2. Не используйте кресло-коляску на дорогах с неровным покрытием (большим количеством ям).**
- 3. Тормоза можно использовать для парковки.**
- 4. Не используйте ручной тормоз кресла-коляски, когда она находится в движении.**

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Складывается и раскладывается кресло-коляска без применения инструмента.

1. Придав вертикальное положение, разложить каркас кресла-коляски по ширине, надавив на направляющие сиденья.
2. Для установки задних колес совместить ось колеса с отверстием на каркасе кресла-коляски, нажать на кнопку на оси до упора, удерживая ее вставить ось с колесом в отверстие на каркасе до щелчка, затем отпустить кнопку.
3. При установке подножек необходимо надеть их на направляющие, находящиеся на каркасе кресла-коляски, и повернуть их в сторону (для правой подножки повернуть против часовой стрелки, для левой — по часовой стрелке) до щелчка фиксатора. Придать эксплуатационное положение опоре стопы и мягким опорам подножки, развернув их на 90 градусов относительно транспортировочного положения.
4. Отрегулируйте высоту подставок для ног.
5. В задние отверстия рамы кресла-коляски, расположенные снизу, под сиденьем, необходимо вставить антипрокидыватели, до щелчка фиксатора.
6. Кресло-коляска готово к эксплуатации.

Складывание производится в обратной последовательности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для посадки спереди:

- поставьте кресло-коляску на стояночный тормоз;
- сложите вверх подножки;
- при помощи сопровождающего лица переместите пользователя в кресло-коляску;
- опустите вниз подножки и поставьте на них ноги;
- пристегните ремень безопасности.

Высадка осуществляется в обратной последовательности.

Для посадки с боковой стороны:

- поставьте кресло-коляску на стояночный тормоз;
- снимите подлокотник со стороны, с которой будет пересаживаться пользователь;
- сложите подножки вверх;
- при помощи сопровождающего лица переместите пользователя в кресло-коляску;
- установите подлокотники и подножки в исходное положение;
- пристегните ремень безопасности.

Высадка осуществляется в обратной последовательности.

Сопровождающее лицо может приводить кресло-коляску в движение и управлять им с помощью предусмотренных для этого рукояток.

При самостоятельном передвижении на кресле-коляске используйте ободы на задних колесах.

Для парковки используйте стояночный тормоз.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура: от +10°C до +35°C;
- относительная влажность: не более 90% (без образования конденсата);
- атмосферное давление: 860 гПа - 1060 гПа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Обслуживание и ремонт товара производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет покупателя.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Допускается протирание поверхностей кресел-колясок 1 % раствором монохлорамина ХБ.
- Изделие не требует проведения предстерилизационной очистки и стерилизации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски.

- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы.
- Необходимо иметь в виду, что изменение положения центра тяжести за счет смещения тела пациента или изменения нагрузки на коляску, а также наклоне на угол более 10° повышается опасность опрокидывания коляски.
- При движении без торможения в направлении препятствия (бордюр, ступенька и т.д.) имеется опасность выпадения из коляски вперед.
- При посадке в коляску и высадке из нее колеса необходимо зафиксировать с помощью тормозов.
- При посадке в коляску и высадке из нее не наступайте на подножку.
- Не превышайте предельную грузоподъемность коляски.
- Прежде чем в одиночку выполнить какое-либо незнакомое действие при использовании коляски, проделайте это под чьим-либо присмотром.
- Не тянитесь за чем-либо через спинку коляски - есть риск опрокинуть коляску.

Сопровождающее лицо должно:

- проверить ходовые качества коляски;
- проверить, чтобы стопы пользователя устойчиво располагались на подножках, а края одежды и покрывала не попадали в спицы колёс;

- предупреждать пользователя о планируемых действиях, особенно при наклоне коляски;
- не разгонять коляску слишком быстро, не изменять резко направление движения;
- не оставлять пользователя в коляске без присмотра, даже если коляска стоит на тормозе;
- следить, чтобы колени и локти пользователя не задевали дверных проёмов и косяков;
- ни при каких обстоятельствах не отпускать коляску при движении в гору или с неё;
- ни в коем случае не наклонять коляску вперёд;
- чтобы съехать с бордюра, необходимо развернуть коляску задними колёсами вперёд, спустить её сначала на задних колёсах, затем опустить передние при отсутствии пандуса;
- при преодолении бордюра наклонить коляску к себе, поставить на бордюр передние колёса, затем подтянуть задние при отсутствии пандуса;
- проводить регулярные осмотры коляски;
- при движении по дорогам соблюдать правила дорожного движения.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизировать, вышедший из эксплуатации товар, следует по СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Фосан Донгфэнг Медикал Эквипмент Мануфактори, (Лтд.)

Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, LTD, 5 Xingfu Rd., zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan city, P.R., China

Адрес: Китай, Дальнее зарубежье, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, LTD, 5 Xingfu Rd., Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan city, China

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «Армедика»,

620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Шевченко, 20, помещ. 7
Телефон: 8 (800) 100-13-05
Электронная почта: info@yukigroup.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

620902, г. Екатеринбург,
ул. 10-ая Самородная, д. 6
+7 (343)226-48-64, 401@yukigroup.ru

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы - не менее 60 месяцев.

Критерием предельного состояния изделия является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления его работоспособности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Предприятие - изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции изделия, поэтому возможны некоторые изменения, неотраженные в настоящем Паспорте и инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара			
Серийный номер (если предусмотрен)		Гарантийный период (см. в паспорте)	
Дата покупки		Номер чека / заказа	
Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями предоставления гарантии, правилами соблюдения мер безопасности, инструкциями по эксплуатации, уходу и обслуживанию ознакомлен.			
Дата		ФИО и подпись	

Продавец:



М.П.



ООО «АРМЕДИКА», 620075,
г. Екатеринбург,
ул. Шевченко 20, пом. 7
тел. 8-800-100-13-05

www.yukigroup.ru

